



# Manual de Instrucciones

Estimulador de Pies Termoeléctrico

EEF-171

# Tabla de contenido

<b>1. Introducción al Manual.</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Características del Producto.</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Instrucciones de Seguridad.</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Componentes del Producto.</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Funciones del Producto.</b> .....	<b>8</b>
<b>6. Uso.</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Uso de Electroodos en algunos casos.</b> .....	<b>13</b>
<b>8. Instrucciones de almacenamiento y cuidado.</b> .....	<b>14</b>
<b>9. Compruebe antes de informar problemas.</b> .....	<b>15</b>
<b>10. Garantía del Producto.</b> .....	<b>17</b>
<b>11. Especificaciones técnicas.</b> .....	<b>18</b>
<b>12. Formato de Calidad y Garantía.</b> .....	<b>19</b>

Gracias por adquirir nuestro producto Etbu.

Por seguridad, lea este manual de instrucciones antes de usar el producto.

Para obtener los mejores resultados al usar este producto, siga este manual de instrucciones.

Este manual también sirve como garantía de calidad, así que asegúrese de no perderlo.

Las ilustraciones en el manual de instrucciones están diseñadas para una explicación, por lo que pueden diferir del producto real en algunas partes.

## Uso del producto

El Estimulador de Pies Termoeléctrico Etbu está diseñado para adultos, es un equipo masajeador que utiliza estimulación eléctrica transcutánea y genera estimulación Eléctrica en los nervios y músculos. Los diferentes programas de masaje estimulan los nervios y contraen los músculos usando varias frecuencias/pulsos.

## Conocimientos Relevantes

### (1) TENS es un masajeador de baja frecuencia usado en masajes físicos.

La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) es un masaje ampliamente conocido que activa los nervios al pasar frecuencias / pulsos en la superficie de la piel, y estas frecuencias / pulsos le dan al área un efecto similar al del masaje a través de la estimulación nerviosa y ayuda a aliviar el dolor muscular. Según los estudios, cuando se aplica la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS), las señales de dolor se bloquean y se liberan sustancias de transducción de señales nerviosas como las endorfinas, lo que activa el mecanismo de control del dolor del cuerpo.

En otras palabras, cuando un pie o piel toca la almohadilla (electrodo), el producto envía varias frecuencias / pulsos a través de la almohadilla (electrodo), masajea directamente los músculos con el estímulo resultante y ayuda a aliviar el dolor agudo y crónico aliviando las señales nerviosas y fomentando la circulación sanguínea. Además, el producto causa contracción muscular y, por lo tanto, se usa para mejorar la función corporal, la obesidad y otras enfermedades.

### (2) ¿Qué es la Estimulación Muscular Electrónica?

Es una tecnología desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) para prevenir la pérdida de masa muscular en astronautas, y es un masaje efectivo para el fortalecimiento muscular, la quema de grasa y la rehabilitación. Al estimular continuamente las fibras musculares con microcorriente (de baja frecuencia) de menos de 100 ~ 200 Hz, ayuda al entrenamiento intensivo de los músculos centrales.

Se puede aplicar a la corrección de la forma del cuerpo y al tratamiento del dolor. El desarrollo muscular y el manejo de áreas específicas es posible, por lo que también se puede utilizar para recuperar un cuerpo equilibrado en el caso de lesiones deportivas.

### **(3) Efecto del masajeador de pies de baja frecuencia (electrodos) TENS / estímulo eléctrico de acuerdo con los resultados del estudio.**

- Fortalece los músculos / reduce la velocidad de reacción de la contracción muscular que Previene la pérdida del componente de proteína que compone el músculo
- Desarrolla los músculos fomentando la actividad fisiológica y la recuperación de los músculos
- Alivia el dolor de espalda al estabilizar el cuerpo del núcleo
- Relaja los músculos anudados al aumentar el flujo sanguíneo
- Mantiene y fomenta la circulación de sangre y linfa
- Aumenta la elasticidad a través de la formación y reordenación de la fibra de colágeno en el tejido conectivo
- Reduce la obesidad a través de la actividad muscular recuperar un cuerpo equilibrado en el caso de lesiones deportivas.

### **(4) Propósito y efectividad del uso por dominio de frecuencia.**

Eficaz para el dolor crónico, los músculos anudados, el entumecimiento, etc. en el dominio de baja frecuencia (menos de 20Hz) y el alivio más rápido del dolor agudo en la espalda, cintura, articulaciones, etc. en el dominio de alta frecuencia (más de 100Hz).

### **(5) Para un uso efectivo.**

Para un uso efectivo, es importante que la almohadilla (electrodo) toque el área exacta.

Al colocar la almohadilla, colóquela en el punto de inicio y final de los músculos, + polo más cerca de su cuerpo y - polo más alejado, y controle adecuadamente la intensidad y la frecuencia de repetición según sus síntomas.

No se recomienda estimular continuamente un área por más de 30 minutos.

Los resultados varían debido al nivel de tensión muscular del usuario, etc., y la intensidad de estímulo necesaria también varía.

### **(6) Intensidad del masaje**

Una mayor intensidad no siempre significa mejores resultados. Por el contrario, es más importante qué tan profundo es el alcance de la frecuencia. Por lo tanto, es necesario controlar la intensidad adecuadamente, y una intensidad innecesariamente alta puede irritar los músculos, ligamentos, etc. y empeorar sus síntomas. En otras palabras, la intensidad es un asunto subjetivo, y debes controlarlo por ti mismo a un nivel con el que te sientas cómodo y bien. No hay un valor absoluto, porque los sentidos de la corriente eléctrica varían entre las personas. Cuando tiene problemas con los sentidos o la comunicación, o cuando tiene una enfermedad que debe tenerse en cuenta, debe seleccionar cuidadosamente la intensidad de acuerdo con su condición y situación.

Los nervios sensoriales de los seres humanos se acostumbran a medida que pasa el tiempo, por lo que es normal sentir como si la intensidad de la corriente se estuviera reduciendo.

Si se siente incómodo con el estímulo eléctrico, una intensidad más débil será mejor.

No es bueno forzarte y soportar el estímulo, ya que esto tensiona aún más tus músculos.

## 2. Característica del Producto

### Seis programas de estímulo eléctrico y 50 niveles de control de intensidad para adaptarse al propósito

Etbu permiten que varios tipos de masajes se ajusten a su propósito, utilizando varios programas que abarcan el concepto de Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS) y Estimulación Muscular Eléctrica (EMS).

Modo	Propósito	Contenido
1	Modo Combinado	■ Circula funciones del modo 2 ~ 6 en total - alivio del dolor → desintegración / emisión → alivio del dolor → desintegración / emisión → mejora → equilibrio → circulación - estímulo de repetición / circulación de 2 ~ 150Hz
2	Modo de mejora muscular	■ Masaje de mejora muscular - estímulo de repetición / circulación de 5 ~ 30Hz
3	Modo de alivio del dolor muscular	■ alivio del dolor muscular - 30 ~ 70Hz repetición / estímulo de circulación
4	Modo de desintegración / emisión	■ Desintegración y emisión de toxinas, etc. - Estímulo de repetición / circulación de 30 ~ 119Hz
5	Modo de mejora de circulación	■ Activación de la activación de sangre / linfa y nervios - 100 ~ 150Hz (a partir de 5 Hz)
6	Modo de equilibrio	■ Equilibrio de relajación nerviosa y ajuste -50~150Hz/10~40Hz/10~50 Hz / Estímulo de repetición / circulación de 1 ~ 50 Hz / 10 ~ 80 Hz

### Efecto maximizado con uso paralelo de termo masaje y masaje de baja frecuencia.

La función térmica del reposapiés ( $40 \pm 5$  °C) ayuda a estimular el metabolismo y fortalece la circulación, y el masaje muscular de baja frecuencia con termo masaje mejora la circulación sanguínea en función del aumento de la temperatura corporal y la acción de bombeo mediante la contracción / relajación de los músculos.

### Frecuencia compleja y pulso para un uso placentero

La almohadilla eléctrica de masaje del estimulador de pies de Etbu es un equipo de estimulación de baja frecuencia personal de dos canales. Da una sensación suave y placentera con el uso de frecuencias / pulsos complejos.

### Dos canales disponibles al mismo tiempo

Es un producto multipropósito que permite el masaje de pies y el uso de un electrodo adhesivo en las partes de su cuerpo al mismo tiempo.

## 2. Característica del Producto

### Se puede usar en el coche

Puede utilizar el producto cuando viaje largas distancias conectándolo al cargador del automóvil, y le ayudará a tener placer y alivio de la fatiga (no se cuenta con función térmica)

### Función de control remoto

No es necesario doblar la espalda, puede usar todas las funciones del masajeador con control remoto.

### Función de pausa

Cuando recibe una llamada telefónica o un visitante mientras usa el masajeador, presione ligeramente el botón de Encendido para hacer una pausa y la alimentación se apagará automáticamente 20 minutos después de la pausa.

### Artículos vendidos por separado disponibles

Se pueden conectar y usar artículos que se venden por separado, como los Maguitos y una rodillera. Puede usar el mango o la almohadilla para la rodilla mientras masajea los pies.



### 3. Instrucciones de Seguridad.

Estas instrucciones son para evitar riesgos a la seguridad del usuario y de los demás, y para evitar daños a la propiedad.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usar, y utilice en consecuencia.

Señal	Contenido
 <b>Peligro</b>	Alto nivel de muerte o cirugía grave con mal uso.
 <b>Advertencia</b>	Riesgo de muerte o cirugía grave con mal uso.
 <b>Precaución</b>	Daño físico o daños a la propiedad pueden ocurrir con el mal uso.

El daño a la propiedad se refiere al daño a la casa / propiedad y al ganado / mascotas

#### Peligro

(Prohibiciones de uso)

No lo use con el siguiente equipo médico.

1. Equipo médico implantado, como marcapasos cardíacos
2. Equipo médico de soporte vital, como marcapasos
3. Equipo médico ponible, como electrocardiógrafo
  - \* Puede causar daños graves a la vida por mal funcionamiento del equipo médico
4. No lo use con un cuchillo electrónico (unidad electro quirúrgica) al mismo tiempo.
  - \* Podría causar averías o quemaduras en el área contactada con la almohadilla.
5. No controle cerca del indicador de onda corta o el equipo médico de microondas (por ejemplo: dentro de 1 m).
  - \* La emisión de baja frecuencia se vuelve inestable

#### Advertencia

(Prohibiciones de uso)

1. No lo use mientras conduce.
2. También recomendamos que las mujeres embarazadas y parturientas no lo usen.
3. No lo use cerca del cerebro, corazón, ojos, oídos, parte superior del cuello, cabeza, boca (área oral), órganos reproductivos, áreas con problemas de la piel.
4. No lo use con una persona que no pueda expresar sus intenciones o con una persona que no pueda controlar el equipo por su cuenta.
5. No lo use cuando la superficie de la almohadilla esté rayada o dañada.
6. Preste especial atención al cable de la almohadilla o al cable eléctrico para que no se envuelvan alrededor de su cuello.
7. No desmonte, repare ni renueve

### 3. Instrucciones de Seguridad.

#### Precaución

(Prohibiciones de uso)

Consulte a un especialista médico antes de su uso en los siguientes casos:

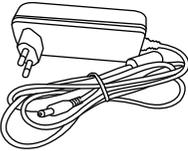
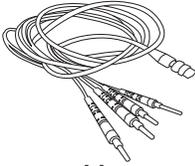
1. Si está recibiendo un tratamiento médico o si siente alguna anomalía física.
2. Si tiene problemas con el corazón o el nervio craneal.
3. Si tiene algún trastorno agudo.
4. Si tiene un tumor maligno o cáncer.
5. Si tiene fiebre alta, por encima de 38 °C.
6. Si está embarazada o si acaba de dar a luz.
7. Si tiene algún problema en la piel en el área de uso.
8. Si tienes alguna enfermedad infecciosa.
9. Si tiene alguna alteración de la sensibilidad de la piel o problemas con la piel.
10. Si eres sensible a problemas o estímulos de la piel.
11. Si tiene una enfermedad aguda como fractura de columna vertebral, distorsión, ruptura muscular, etc.
12. Si tiene un trastorno perceptivo debido a un alto nivel de circulación circulatoria periférica disturbios causados por diabetes, etc.

#### Advertencia

(Prohibiciones de uso)

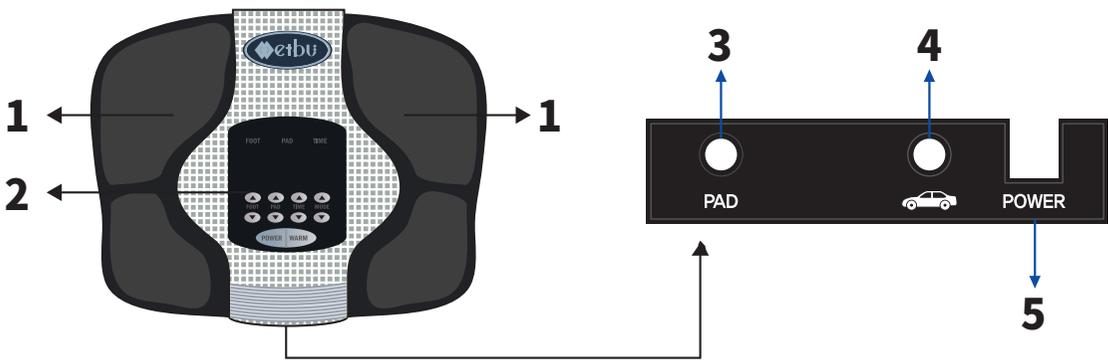
1. Use solo durante el período de tiempo prescrito.
2. No use dos o más de este producto y otro estimulador al mismo tiempo.
3. Si siente una anomalía física o eczema, sarpullido, picazón en la piel, deje de usar inmediatamente.
4. Si coloca la almohadilla en otra área mientras la usa, asegúrese de apagarla primero y luego conecte la almohadilla. Riesgo de choque intenso.
5. No conecte la almohadilla a otra persona mientras usa. Riesgo de choque intenso.
6. No lo use mientras use equipo electrónico como relojes. Pueden producirse errores de tiempo y valor.
7. Si el equipo no funciona correctamente, apáguelo inmediatamente para evitar accidentes y solicite información sobre la reparación al centro de servicio al cliente de Etbu. Riesgo de accidente por calor y cortocircuito, y riesgo de mal funcionamiento.
8. No enchufe ni desenchufe el cable con las manos mojadas.
9. No lo use en niños, y no permita que los niños jueguen con el cuerpo del equipo o la almohadilla.
10. No lo use en áreas húmedas como el baño o la sauna, o mientras toma un baño.
11. No lo use cuando duerme.
12. Para evitar infecciones de la piel, no comparta el electrodo con otras personas.
13. Para prevenir infecciones de la piel, no deje la almohadilla en el área afectada.
14. No lo use mientras la almohadilla esté en contacto con metal, como cinturón, collar, etc.
15. En caso de apagón, apague inmediatamente el interruptor de encendido.

# 4. Componentes del producto

Componentes del producto			Productos Complementarios (se venden por Separado)	
				
<b>Consola</b>	<b>Control Remoto</b>	<b>Baterias</b>	<b>Electrodos</b>	<b>Rodillera</b>
				
<b>Cable de Poder</b>	<b>Conector para Vehículo</b>	<b>Cable para complementos</b>	<b>Manguitos</b>	

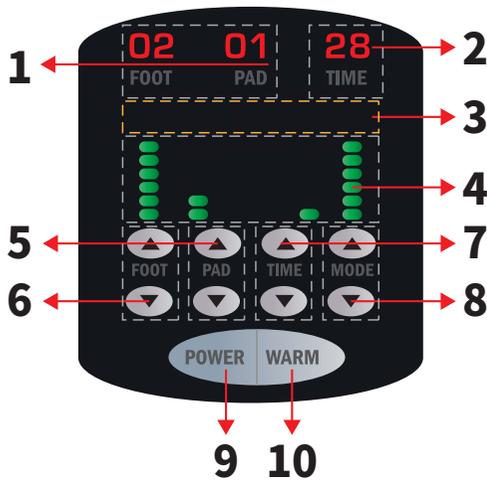
# 5. funciones del Producto

Nombre y función de cada parte



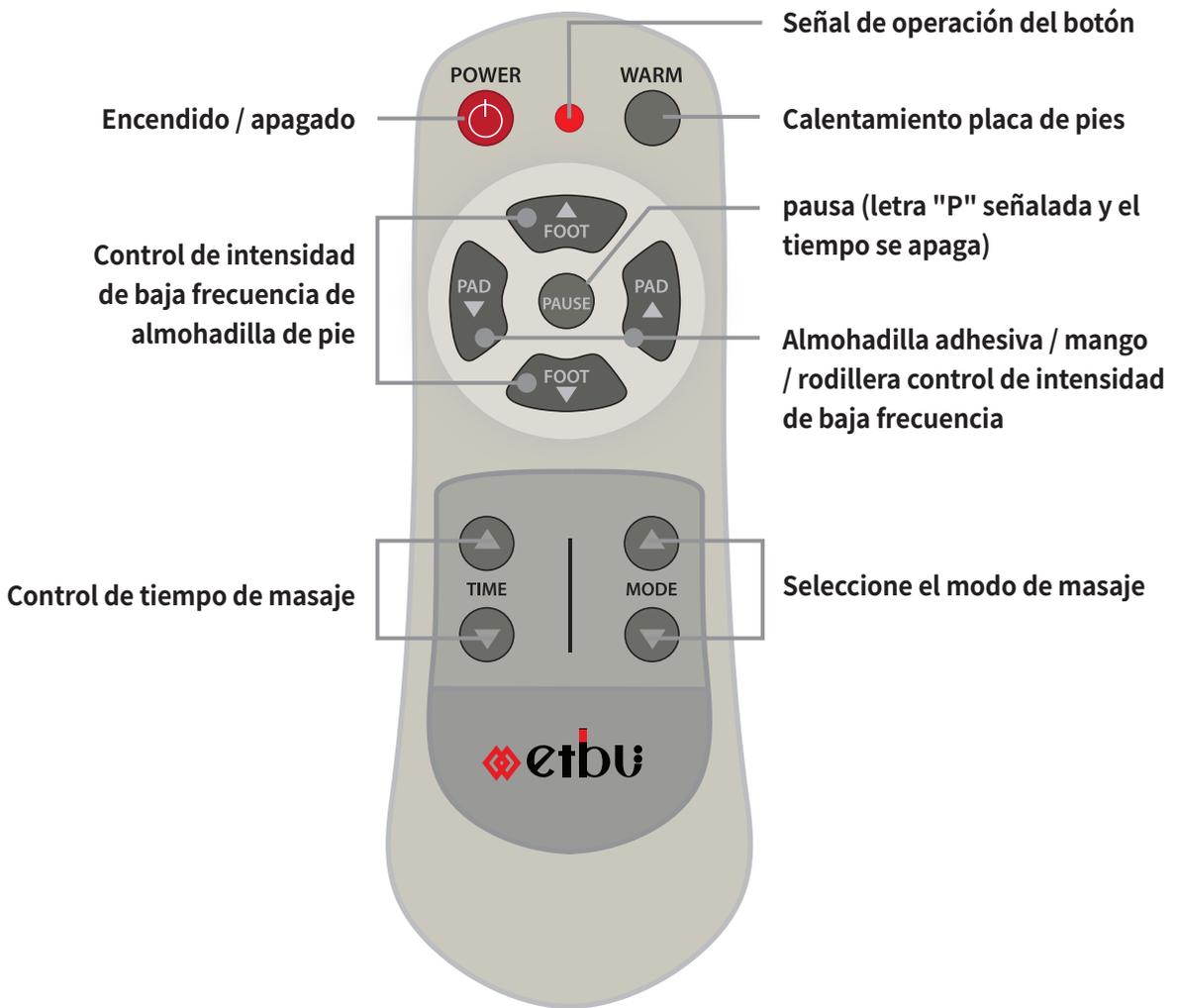
- 1. Placa para Pies
- 2. pantalla: Control / Pantalla

- 3. Electrodo/ mango / rodillera conector
- 4. Conector del cargador del coche
- 5. Cable de poder



1. Placa para pies  
señal de intensidad de baja frecuencia
2. Señal de tiempo de masaje
3. Señal de función de masaje /  
placa para el pie caliente / pausa
4. Señal de operación de masaje
5. Aumenta la intensidad de PIE / PAD
6. Disminuye la intensidad de PIE / PAD
7. Aumente el tiempo / seleccione el modo
8. Disminuir el tiempo / seleccionar el modo
9. apagado/pausa
10. Encendido

Parte	Explicación
FOOT	Botón de control de intensidad de baja frecuencia de la placa para los pies (criterios: 0 ~ 50 etapas, intervalo seleccionable: una etapa)
PAD	Cojín adhesivo / mango / rodillera botón de control de intensidad de baja frecuencia (criterios: 0 ~ 50 etapas, intervalo seleccionable: una etapa)
TIME	Botón de control de tiempo del masaje (ajuste predeterminado 30 minutos, control entre 5 ~ 90 minutos disponible con intervalos seleccionables de 5 minutos)
MODE	Botón de selección de modo de masaje (modo 1 ~ 6)
POWER	Botón de ENCENDIDO / APAGADO (Presione durante 3 segundos para APAGAR) ※ Función PAUSA: presione ENCENDIDO brevemente para detener el masaje durante el uso
PAUSE 기능	Presione POWER brevemente para pausar el masaje mientras usa.
WARM	Botón de ENCENDIDO / APAGADO de la almohadilla de pie La temperatura se controla automáticamente alrededor de $40 \pm 5^\circ\text{C}$ ※ La función térmica no está disponible cuando está conectada al cargador del automóvil, para proteger el auto
	Cojín adhesivo / mango / rodillera conectora de cable inserto
	Inserto de conector de cargador de coche, para uso en automóvil (DC12V)
	Insertión del adaptador de corriente (AC100 ~ 240V X 2A)



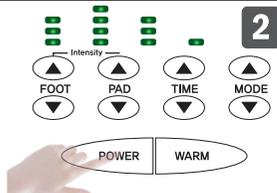
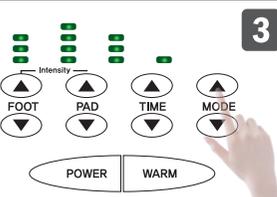
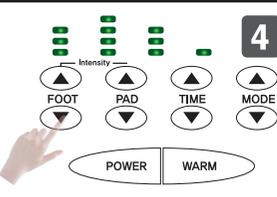
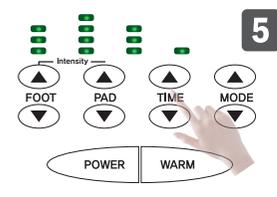
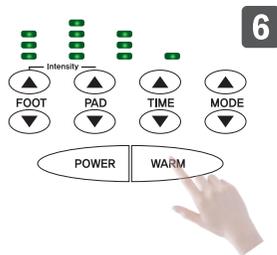
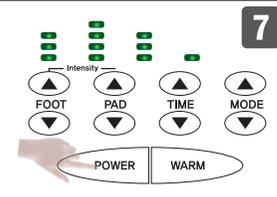
## 6. Uso

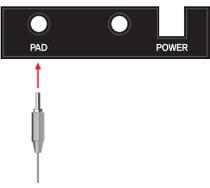
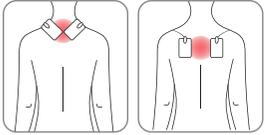
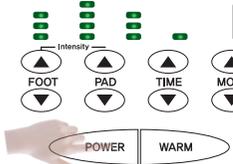
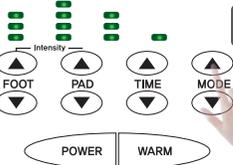
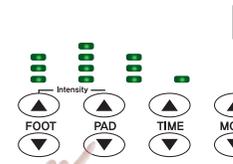
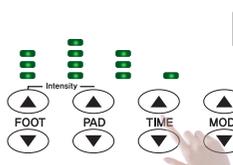
Antes de usar

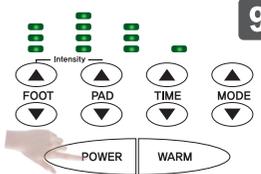
1. Coloque el producto en una superficie plana y estable.
2. Primero compruebe si la potencia del producto coincide con la potencia que está utilizando a diario, luego conecte el adaptador al cuerpo del producto y conecte el enchufe a una toma de corriente. Es normal si la señal parpadea como en la siguiente imagen.



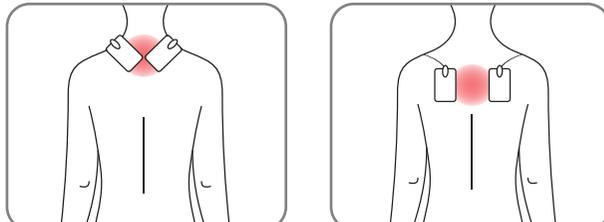
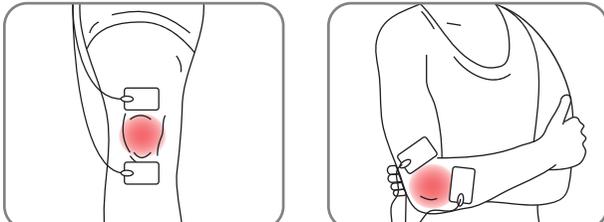
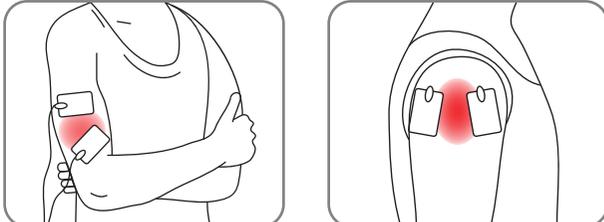
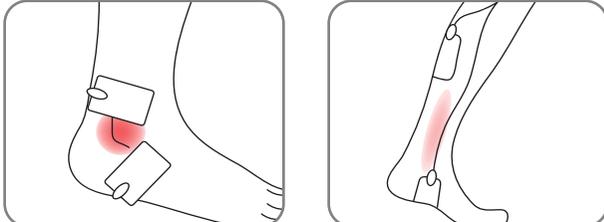
3. Después de presionar el botón de Encendido, es normal que suene una señal acústica al presionar los botones PIE, PAD, MODO y HORA.

	<p><b>1</b></p> <p><b>Pon tus pies en las almohadillas de los pies.</b>          Úselo después de quitarse los calcetines y limpiarse los pies.          Es posible obtener mejores resultados si aplica gel de baja frecuencia o pone paños húmedos debajo de los pies.          * Precaución: no pise el producto.</p>
	<p><b>2</b></p> <p><b>Presione el botón ENCENDIDO.</b>          La pantalla muestra una configuración predeterminada (Modo: 1, intensidad: 0, tiempo: 30 minutos).          Sin embargo, si usa continuamente después de la finalización en el modo de encendido, aparece el último modo utilizado.</p> 
	<p><b>3</b></p> <p><b>Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) del modo de masaje para seleccionar el modo de masaje preferido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modo: 1 ~ 6 (predeterminado: modo o modo previamente usado 1)</li> <li>- Presione el botón ARRIBA (▲) para aumentar 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.</li> <li>- Presione el botón ABAJO (▼) para disminuir 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.</li> </ul>
	<p><b>4</b></p> <p><b>Seleccione la intensidad de PIE.</b>          Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de PIE para controlar la intensidad agradable.          . No, use alta intensidad desde el principio.          El nivel de intensidad varía de 0 a 50, con intervalos seleccionables de 1 etapa.</p>
	<p><b>5</b></p> <p><b>Seleccione el tiempo de masaje.</b>          Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de la Hora para seleccionar la hora preferida.          La configuración predeterminada es de 30 minutos.          La selección de tiempo varía de 5 a 90 minutos, con intervalos seleccionables de 5 minutos.          (Ejemplo: Redondeando, presione ARRIBA (▲) una vez cuando quedan 33 minutos, y el tiempo cambia de 35 minutos a 40 minutos).</p>
	<p><b>6</b></p> <p><b>Seleccione si se debe usar la función térmica de la almohadilla para el pie.</b>          Puede activar / desactivar la función de Infra-rojo presionando el botón WARM.          La función Infra-rojo se inicia cuando la pantalla muestra "W."          La temperatura establecida es de 40 °C ± 5 °C, controlada automáticamente.          * Precaución: El termo no está disponible cuando POWER está conectado por el cargador del automóvil (para evitar daños en la batería del automóvil).</p>
	<p><b>7</b></p> <p><b>Puedes pausar entre uso.</b>          Presione el botón POWER brevemente para hacer una pausa.          La pantalla muestra "P" y el tiempo que queda parpadea.          Si el usuario no reanuda el uso durante 20 minutos, el sistema se restablece automáticamente a la configuración de encendido predeterminada.</p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>Desconecte la corriente después de usar.</b></p>

<p><b>1</b></p>	<p><b>Asegúrese de que la corriente esté apagada.</b></p>
<p><b>2</b></p> 	<p><b>Conecte el cable de la almohadilla adhesiva (mango / rodillera) al cuerpo del producto.</b></p> <p><b>Precauciones al usar el cable de la almohadilla</b>          No levante ni tire del cable violentamente.          Cuando desenchufe el cable del cuerpo, hágalo sujetando el producto y la toma del cable cerca del cuerpo.          Si el cable de la almohadilla está dañado o cortado, compre un cable nuevo como artículo vendido por separado.</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><b>Conecte el cable de la almohadilla adhesiva (mango / almohadilla para la rodilla) profundamente en la almohadilla adhesiva (mango / almohadilla para la rodilla).</b></p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>Fije firmemente la almohadilla adhesiva (almohadilla para la rodilla) en el área deseada.</b></p> <p>Quando use almohadillas adhesivas, colóquelas a 20 cm de distancia.          - Presione el botón ABAJO (▼) para disminuir 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.</p> <p><b>* Cuando se usa adhesivo por primera vez</b>          Saque la almohadilla de la envoltura de vinilo transparente.          No quite la película transparente en el lado interior de la almohadilla todavía.</p>
<p><b>5</b></p> 	<p><b>Presione el botón ENCENDIDO.</b></p> <p>La pantalla muestra una configuración predeterminada (Modo: el último modo utilizado, intensidad: 0, tiempo: 30 minutos).          Sin embargo, si usa continuamente después de la finalización en el modo de encendido, aparece el último modo utilizado.</p> 
<p><b>6</b></p> 	<p><b>Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) del modo de masaje para seleccionar el modo de masaje deseado. Modo: 1 ~ 6 (predeterminado: modo o modo previamente usado 1) Presione el botón ARRIBA (▲) para aumentar 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6. Presione el botón ABAJO (▼) para disminuir 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1.</b></p>
<p><b>7</b></p> 	<p><b>Seleccione la intensidad PAD.</b></p> <p>Presione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de PAD para seleccionar una intensidad agradable.          No use alta intensidad desde el principio.          La intensidad varía de 0 a 50, con intervalos seleccionables de 1 etapa.</p> <p><b>Nota</b>          La intensidad disminuye al usar ambas almohadillas para la rodilla derecha e izquierda al mismo tiempo.</p>
<p><b>8</b></p> 	<p><b>Seleccione el tiempo de masaje.</b></p> <p>Seleccione el botón ARRIBA (▲), ABAJO (▼) de la Hora para seleccionar la hora deseada.          La configuración predeterminada es de 30 minutos.          La selección de tiempo varía de 5 a 90 minutos, con intervalos de tiempo (Ejemplo: Redondeando, presione ARRIBA (▲) una vez cuando quedan 33 minutos, y el tiempo cambia de 35 minutos a 40 minutos).</p>

 <p><b>9</b></p>	<p><b>Puedes pausar entre uso.</b>          Presione el botón POWER brevemente para hacer una pausa.  <b>La pantalla muestra "P" y el tiempo que queda parpadea.</b>          Si el usuario no reanuda el uso durante 20 minutos, el sistema se restablece automáticamente a la configuración predeterminada de encendido.</p>
<p><b>10</b></p>	<p><b>Desconecte la corriente después de usar.</b></p>

## 7. Uso de Electrodo en algunos casos

<p><b>Hombro</b></p> <p>Se recomienda colocar en simetría bilateral alrededor de su columna vertebral.</p>	
<p><b>Articulación</b></p> <p>Se recomienda colocar encima y debajo de la articulación con dolor.</p>	
<p><b>Brazo</b></p> <p>Se recomienda colocarlo por arriba y por debajo, o en el frente y en la parte posterior del brazo.</p>	
<p><b>Pie</b></p> <p>Se recomienda colocar una almohadilla en la planta del pie y la otra alrededor del tobillo o la pantorrilla.</p>	

## 7. Uso de Electrodo en algunos casos

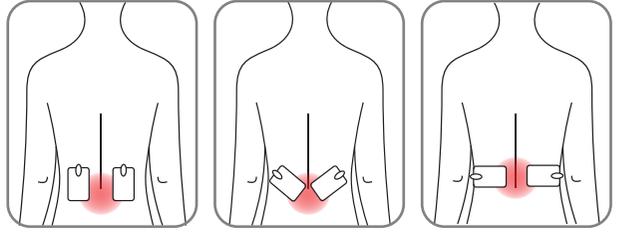
### Pantorrilla

Se recomienda colocarlo en la parte superior e inferior de la pantorrilla.  
No lo use en ambos pies / piernas al mismo tiempo.



### Cintura

Se recomienda colocar en simetría bilateral alrededor de su columna vertebral.



## 8. Instrucciones de Almacenamiento y cuidado

1. Después de su uso, limpie la almohadilla para el pie / parche / mango / rodillera / etc. antes de almacenar
2. Preste especial atención a los siguientes asuntos sobre el lugar de almacenamiento.
  - Mantener fuera del agua
  - Almacene en un lugar sin riesgo de efectos adversos por la presión del aire, la temperatura, la humedad, la luz solar, el polvo, el aire que contiene sal, azufre, etc.
  - Preste especial atención a la estabilidad, como inclinación, vibración, choque (incluso cuando se mueve).
  - No almacenar en el área de almacenamiento de químicos o donde se produce gas, etc.
3. Cuando lo utilice después de un largo período de almacenamiento, verifique las anomalías del producto antes de usarlo.

### Como Limpiar

1. Preste atención para mantenerse fuera del agua.
2. No limpiar con solvente orgánico (benceno, diluyente, etc.)
3. Limpie ligeramente con un paño suave y seco.
4. Después de limpiar con un paño húmedo, limpie con un paño seco y deje secar.
5. No restriegue o limpie fuertemente los electrodos de las almohadillas de los pies.

## 9. Compruebe antes de informar problemas

### Primeros auxilios

1. En el caso de un rayo / trueno, deje de usar y extraiga el cable de alimentación.
2. Si el producto huele que está ardiendo o sale humo, pare inmediatamente y póngase en contacto con el lugar de compra.
3. Si se produce una anomalía física, suspenda inmediatamente el uso y consulte al médico.
4. Si descubre una falla en el producto, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, deje de usarlo y póngase en contacto con el lugar de compra.
5. Si derramó agua sobre el producto, apague inmediatamente el interruptor de alimentación, desconecte la clavija de alimentación y póngase en contacto con el establecimiento de compra.

### Verifique antes de reportar problemas

Cuando se produce una anomalía del producto, primero compruebe los siguientes casos

Es posible que el producto no funcione correctamente cuando se utiliza sin una comprensión adecuada del método de uso.

síntoma	Punto de control	Prueba esto
El producto no se enciende	¿El enchufe del adaptador está conectado correctamente?	Vuelva a enchufar el adaptador.
	¿Está el cable de alimentación correctamente conectado?	Conecte el cable de alimentación.
La emisión de baja frecuencia no ocurre.	¿Seleccionó la intensidad de baja frecuencia?	Seleccione intensidad de baja frecuencia.
	No quité la película transparente del lado del accesorio de la almohadilla.	Quita la película transparente del lado del accesorio de la almohadilla.
	El lado del accesorio de la almohadilla se contaminó.	Lave suavemente con la punta de los dedos durante unos segundos en una pequeña cantidad de agua que fluye.
	Usé justo después de lavarme.	Deje que el lado del accesorio se seque naturalmente después de eliminar la humedad.
La intensidad de emisión de baja frecuencia de las almohadillas de los pies es demasiado débil.	¿Está la almohadilla adherida al pie?	Adhiere la almohadilla cerca del pie.
	¿La intensidad de emisión se establece en un nivel bajo?	Cambiar la intensidad de emisión de baja frecuencia.

## 9. Compruebe antes de informar problemas

<b>síntoma</b>	<b>Punto de control</b>	<b>Prueba esto</b>
La intensidad de emisión de baja frecuencia del PAD es demasiado débil.	¿La almohadilla / parche / mango / rodillera está adherida al área de uso?	Adhiera la almohadilla / parche / mango / rodillera cerca del área de uso.
	¿El conector de la almohadilla / parche / mango / rodillera está firmemente conectado?	Conecte firmemente el encaje de la almohadilla / parche / mango / rodillera.
	¿Hay contaminación en el conector de la articulación del cable y almohadilla / parche / mango / rodillera?	Limpie la unión del cable de la almohadilla / parche / mango / rodillera.
	Me superpuse almohadillas.	Coloque las almohadillas por separado para que no se superpongan.
	El lado del accesorio de la almohadilla está contaminado.	Lave suavemente con la punta de los dedos durante unos segundos en una pequeña cantidad de agua que fluye.
	El control de intensidad se debilitó.	Cambiar intensidad.
La intensidad de emisión es muy fuerte.	¿El nivel de intensidad es demasiado alto?	Cambiar el nivel de intensidad.
El lado del accesorio de la almohadilla está pegajoso.	Lo usé mientras sudaba	Guarde la almohadilla en el refrigerador durante la noche y sáquela.
	Me lavé durante mucho tiempo y con frecuencia.	
	Lo dejé cerca de alta temperatura, humedad y luz solar directa.	
El lado del accesorio de la almohadilla está desgastado.	Una gran cantidad de sudor o humedad está en el lado de fijación de las almohadillas.	El pad es un consumible. Si el lado del accesorio está dañado, deje de usar y compre por separado vendido
Pica durante el uso. Mi piel se enrojece.	El tiempo de uso es demasiado largo.	Mantenga el tiempo de uso recomendado.
	¿El área con la almohadilla está cerca de algún electrodoméstico?	Retírese del electrodoméstico más cercano y no entre en contacto hasta terminar la sesión.
	¿Hay alguna contaminación en la superficie de la almohadilla o presenta algún área negra?	Limpie la contaminación del área o mancha negra de la almohadilla.
	El área de fijación de la almohadilla se ensucia o está seca.	Lave suavemente con la punta de los dedos durante unos segundos en una pequeña cantidad de agua que fluye. Aplique gel de baja frecuencia cuando lo use.

## 10. Garantía del Producto

### Sobre el servicio

Antes de preguntar sobre la reparación, primero lea el [diagnóstico de daños y el método de tratamiento], y si todavía hay problemas y problemas, asegúrese de ponerse en contacto con el lugar de compra.

Al preguntar sobre la reparación, díganos el nombre del producto, el nombre del modelo, el daño o la anomalía (en detalle), el número de contacto, la dirección, su nombre, etc.

### Garantía libre

Si se determina que el producto está defectuoso en el proceso de producción o en condiciones normales de uso, proporcionamos una garantía gratuita de 1 año (desde la fecha de compra). La garantía de calidad para este producto está cubierta por el contenido de la garantía. El período de garantía se calcula a partir de la fecha de compra, así que asegúrese de tener su fecha de compra indicada.

(Si la fecha de compra no es identificable, el período de garantía se calcula a partir de la fecha de producción).

### Derechos del cliente

El cliente tiene derecho a obtener la garantía gratuita durante 1 año a partir de la fecha de compra si se produce un desperfecto durante el uso. Sin embargo, si el daño se debe a una falla del cliente o un desastre natural, la reparación corre por cuenta del cliente incluso durante el período de garantía gratuita.

### Responsabilidad por el servicio cobrado (a cargo del cliente)

- Al preguntar sobre el servicio, los siguientes casos deben cubrirse a expensas del cliente, incluso durante el período de garantía gratuita.
- Si el daño se debe a un desastre natural (incendio, terremoto, inundación, rayos, etc.)
- Si el daño se debe a la culpa del cliente
- Si el daño se debe usar fuera del entorno de uso garantizado.
- Si el daño se debe al desmontaje, montaje y renovación voluntarios del cliente.
- Si el mal funcionamiento, etc. se debe a la conexión con el producto de otra compañía.
- Si el mal funcionamiento se debe a la introducción de un contaminante extraño (bebida, café, basura), etc., dentro del producto.
- En el caso de los consumibles
- Si el daño y el mal funcionamiento se debe por caídas o golpes.
- Si el daño se debe a usar un voltaje incorrecto.
- Si el daño se debe a una reparación o renovación hecha por una persona que no sea nuestro técnico de reparación.
- Si el daño se debe a no seguir las "instrucciones de seguridad" de este manual de instrucciones.
- El producto puede usarse durante mucho tiempo si se siguen bien las "instrucciones de seguridad".

# 11. Especificaciones

<b>Nombre del Producto</b>	Estimulador de Pies Térmico Eléctrico
<b>Modelo</b>	EEF-171
<b>Voltaje nominal</b>	AC 100~240V/ 50~60Hz
<b>El consumo de energía</b>	30VA
<b>Máxima emisión de corriente</b>	20mA
<b>Emisión máxima de voltaje</b>	80Vp-p
<b>Emisión de frecuencia</b>	2Hz ~ 150Hz (variable continua)
<b>Tiempo de operación</b>	Predeterminado 30 minutos (selección de 5 ~ 90 minutos)
<b>Modo de ajuste</b>	1 ~ 6 (programa digital)
<b>Temperatura de Infrarrojo</b>	40°C ± 5°C
<b>Dimensiones</b>	410 X 330 X 110 mm
<b>Peso</b>	1.9Kg



## 12. Formato de Calidad y Garantía

### Formato de Calidad y Garantía

El período de A / S está garantizado solo con verificación por escrito desde el lugar de compra.

El servicio (A / S) está registrado en la oficina central y las sucursales.

En caso de avería, no repare en un taller de reparación general (se ha incorporado un circuito eléctrico especial).

Sin embargo, el daño debido a la destrucción o falla intencional del cliente debe ser reparado por cuenta del cliente.

Nombre del producto	Electro Thermo Foot Massager	Modelo	EEF-171
Periodo de Garantía	1 año desde la fecha de compra	Numero de Producción	
Fecha de compra	(dd\mm\aaaa) \ \	Final de Garantía	
Nombre del cliente		Lugar de compra	
Contacto	TEL:	Sucursal	TEL:
Dirección del cliente		Dirección de Sucursal	

\* La garantía gratuita está disponible solo cuando en el <lugar de compra> se verifica con su compra

.....

\* Asegúrese de conservar esta garantía de calidad de forma segura, ya que los servicios adecuados están disponibles para consultas de reparación solo cuando se presente esta garantía.

1. La garantía de calidad para este producto está cubierta por el contenido de la garantía.
  2. Tenga la fecha de compra escrita, ya que el período de garantía se calcula a partir de la fecha de compra. (Si la fecha de compra no es identificable, el período de garantía de calidad se calcula a partir de la fecha posterior a 3 meses a partir de la fecha de producción).
  3. Se aplica un período de garantía gratuito de 6 meses si el producto doméstico se utiliza para negocios (actividades comerciales, entorno de uso anormal, etc.).
  4. Esta garantía no se puede volver a emitir.
- .....



**EtBu Co.,Ltd.**

98, Hanggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,  
Republic of Korea



**etbi**

**MADE IN KOREA**